



Tiempo máximo de uso:

Nunca se debe rebosar el límite de llenado señalado en el recolector o guardián que generalmente se debe llenar solo las $\frac{3}{4}$ partes. Si no se ha llenado en ese porcentaje y ya se **cumple un mes** igualmente debe desecharse.

El recipiente se llena hasta sus $\frac{3}{4}$ partes, en ese momento se agrega una solución desinfectante, como peróxido de hidrógeno al 20 a 30 % (agua oxigenada) o le agregamos solución de hipoclorito de sodio al 0.5%, se deja actuar no menos de 20 minutos para desactivar los residuos, luego se vacía el líquido en lavamanos o lavaderos, se sella el recipiente, introduciéndolo en bolsa roja rotulada como material corto punzante, se cierra, marca y luego se lleva al almacenamiento para recolección externa, para su recolección y posterior incineración



Institución _____
 Origen _____
 Tiempo de reposición _____
 Fecha de recolección- _____
 Responsable _____

Los recipientes para residuos corto punzantes son desechables y deben tener las siguientes características:

- Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C.
- Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes.
- Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta
- Rotulados de acuerdo a la clase de residuo.
- Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.
- Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 Newton

“ESTE PRODUCTO NO REQUIERE REGISTRO INVIMA”