

**DISPONIBILIDAD**

**DEFINICIÓN:** La bolsa de drenaje urinario recoge la orina proveniente de la vejiga del paciente.

**CERTIFICACIÓN N°: INVIMA 2011DM-0008318**

**COLOR:** Blanco - transparente

- Conector: Tipo universal, compatible con los calibres de las sondas.
- Protector del Dispositivo: Fabricado en Polietileno y/o Polipropileno, protege el conector, hasta su uso.
- Manguera: Fabricada en PVC traslucida, permite el paso de líquido a la bolsa.
- Bolsa drenaje Urinario: Fabricada en PVC, su función es alojar y permitir la visualización adecuada de las características y cantidad de orina eliminada por el paciente.
- Escala Volumétrica: Impresa en tinta de color para facilitar su lectura, su función es permitir el cálculo exacto de la diuresis del paciente.
- Manguera para toma de muestras/vaciamiento: Posee un dispositivo que permite la interrupción del flujo; su función es permitir la toma de muestras/vaciamiento de la bolsa.

**BENEFICIOS**

- Sujetador universal
- Válvula de drenaje tipo T
- Ventilación
- Conector para toma de muestra sin aguja
- Válvula antirreflujo
- Dos niveles de llenado.

|               |               |                         |
|---------------|---------------|-------------------------|
| REVISÓ: _____ | APROBÓ: _____ | <b>COPIA CONTROLADA</b> |
| CARGO: _____  | CARGO: _____  |                         |
| FECHA: _____  | FECHA: _____  |                         |

|                            |                       |   |
|----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Eterna</b> <sup>®</sup> | <b>FICHA TÉCNICA</b>  | CODIGO: MEN-040<br>FECHA DE VIGENCIA:<br>08-06.2012<br>HOJA 2 DE 3<br>ACTUALIZACIÓN: 00 |
|                            | <b>BOLSA DE ORINA</b> |   |

- Conector universal para sonda.

## EMBALAJE

| CÓDIGO INTERNO | DESCRIPCIÓN                         | CÓDIGO BARRAS UNIDAD | CÓDIGO BARRAS SUBEMPAQUE | EMBALAJE SUBEMPAQUE | CÓDIGO BARRAS CORRUGADO | EMBALAJE CORRUGADO |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 41411513<br>3  | BOLSA RECOLECTORA DE ORINA - 2000ml | 7702037100<br>601    | -                        | -                   | 277020371<br>00612      | 20 Unid            |

## APLICACIONES

Se recomienda el uso de este dispositivo para la recolección de fluidos corporales (orina), como muestra para examen de laboratorio, complemento de la sonda vesical.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Realice lavado de manos antes y después de realizar el procedimiento.
- Utilice elementos de bioseguridad (guantes) que le permitan manipular correctamente el dispositivo médico.
- Informe al paciente del procedimiento detallado que va a realizar.
- Realice asepsia del área genital.
- Conecte la sonda al sistema recolector
- Fije la sonda a la bolsa recolectora, dejando visible el trayecto de éste, para detectar en forma temprana signos de infección o infiltraciones.
- Trazabilidad: persona responsable del procedimiento, fecha, hora y calibre de la sonda.
- Vigile color y cantidad de la orina según indicaciones médicas.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las bolsas recolectoras deben tocar el piso. Siempre deben estar debajo del nivel de la vejiga, aún para el traslado del paciente, para evitar la contaminación por reflujo. Informe al paciente para que no lleve la bolsa colectora por encima de la vejiga.

- No debe utilizarse cuando se detecte cualquier daño en el empaque y/o dispositivo médico..



Línea Gratis a Nivel Nacional 01 8000 121 000  
 www.eterna.com.co • info@eterna.com.co  
 Cra. 66 No. 13-43 • PBX (1) 260 1100 • (1) 570 2727  
 Fax: (1) 570 5120 • 260 4009 • Bogotá D.C. • Colombia



|                            |                       |   |
|----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Eterna</b> <sup>®</sup> | <b>FICHA TECNICA</b>  | <b>CODIGO:</b> MEN-040<br><b>FECHA DE VIGENCIA:</b><br>08-06.2012<br><b>HOJA</b> 3 DE 3<br><b>ACTUALIZACIÓN:</b> 00 |
|                            | <b>BOLSA DE ORINA</b> |   |

- No se debe reesterilizar.
- Es para un solo uso, y debe ser descartado después de usarlo.
- Se debe utilizar antes de la fecha de vencimiento.
- Una vez abierto el empaque individual la bolsa se debe utilizar inmediatamente el dispositivo médico bolsa de orina.
- Se debe mantener la bolsa colectora de orina por debajo del nivel de la vejiga.

### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

La vida útil de este producto, es garantizada por un periodo de 5 años siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las siguientes condiciones físicas de almacenamiento:

- Temperatura máxima: 30C°
- Humedad relativa permanente: máximo 70%
- No exponerse a la luz solar directa ni luces brillantes. Mientras el producto permanezca en el empaque original, el riesgo de decoloración o manchado por exposición a la luz solar o lámparas UV es mínimo; pero una vez sean expuestos directamente, presentarán cambios de coloración en mayor o menor grado, de acuerdo con la intensidad de la luz y el tiempo de exposición.
- En el área destinada al almacenamiento, no deben mantenerse sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, varsol, gasolina y solventes alifáticos y aromáticos los cuales afectan tanto el material de empaque como el dispositivo médico.
- Los sifones del área de almacenamiento deben tener doble salida a la caja de desagüe, para evitar olores que puedan afectar el producto.
- El área debe estar libre de goteras y de entrada de gases contaminantes como los de combustión de automotores (monóxido de carbono, dióxido de carbono).
- El almacén debe estar dotado de ventilación adecuada que permita mantener las condiciones físicas ya descritas.

### **DISPOSICIÓN FINAL**

La disposición final de las bolsas colectoras de orina usadas, es responsabilidad de las entidades hospitalarias o entidades prestadoras de servicios de salud, las cuales deben cumplir con los requerimientos del Manual de Residuos Hospitalarios que da cumplimiento al decreto 2676 de 2000.



Línea Gratis a Nivel Nacional 01 8000 121 000  
[www.eterna.com.co](http://www.eterna.com.co) • [info@eterna.com.co](mailto:info@eterna.com.co)  
 Cra. 66 No. 13-43 • PBX (1) 260 1100 • (1) 570 2727  
 Fax: (1) 570 5120 • 260 4009 • Bogotá D.C. • Colombia



|                            |                       |   |
|----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Eterna</b> <sup>®</sup> | <b>FICHA TÉCNICA</b>  | <b>CODIGO:</b> MEN-040<br><b>FECHA DE VIGENCIA:</b><br>08-06.2012<br><b>HOJA 2 DE 3</b><br><b>ACTUALIZACIÓN:</b> 00 |
|                            | <b>BOLSA DE ORINA</b> |   |



Linea Gratis a Nivel Nacional 01 8000 121 000  
www.eterna.com.co • info@eterna.com.co  
Cra. 66 No. 13-43 • PBX (1) 260 1100 • (1) 570 2727  
Fax: (1) 570 5120 • 260 4009 • Bogotá D.C. • Colombia

