



<b>FIBRACOL PLUS</b> Apósito a base de colágeno con alginato	<b>SYSTAGENIX</b>	
	<b>FICHA TECNICA</b>	<b>FIBRACOL PLUS</b>

Fabricante	Systagenix Wound Management
Producto	Fibracol Plus
Genérico	Apósito a base de colágeno con alginato de calcio
Descripción	Apósito compuesto de fibras de colágeno al 90% y de alginato de calcio al 10%, esta combinación única de biopolímeros naturales entre las estructuras del colágeno y las propiedades de formación de un gel de los alginatos lo hacen un apósito suave, confortable, absorbente y cómodo para favorecer la granulación en las heridas.
Propiedades	<p>El apósito en presencia del fluido de la herida mantiene un microambiente fisiológicamente húmedo en la superficie de esta, favoreciendo el tejido de granulación y epitelización.</p> <p>Es versátil como apósito primario.</p> <p>El colágeno se absorbe gradualmente por completo.</p> <p>Favorece la formación de colágeno tipo III al colágeno tipo I brindando resistencia tensil al nuevo tejido.</p> <p>Evita los residuos de fibras en la herida.</p> <p>Se puede cortar. Absorbe hasta 20 veces su peso en exudado.</p> <p>Conserva la integridad inicial aun luego de mojarse.</p>
Indicaciones	<p>Usarlo para el control de exudado y el favorecimiento de tejido de granulación en heridas limpias de cargas bacterianas y de tejidos necróticos secos y/o húmedos.</p> <p>Indicado en heridas quirúrgicas, UPP, Ulceras venosas, Ulceras causadas por etiologías vasculares mixtas, úlceras diabéticas, Quemaduras de 1er y 2do grado, Zonas donantes, Abrasiones, cierres por segunda intención, incisiones quirúrgicas dehiscentes.</p> <p>En heridas de exudado bajo aplicar el apósito humedecido para facilitar el proceso gelificante.</p>
Precaución	NO aplicar en heridas con vasculitis activa, quemaduras de 3er grado y/o pacientes con sensibilidad conocida al colágeno o al alginato.
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación estéril.</li> <li>• El colágeno es compatible con el lecho de la herida y proporciona apoyo estructural favoreciendo la rápida regeneración celular.</li> <li>• Permite la transmisión del exudado sin maceración.</li> <li>• Garantiza humedad en la herida.</li> <li>• No compromete la integridad de la piel periférica.</li> <li>• Es completamente reabsorbible por el organismo evitando trauma al nuevo tejido en los cambios de curación.</li> <li>• Se mantiene compacto evitando dejar hilachas en la superficie de la herida.</li> </ul>

<b>FIBRACOL PLUS</b> Apósito a base de colágeno con alginato	<b>SYSTAGENIX</b>	 <b>Systagenix</b> WOUND MANAGEMENT
	<b>FICHA TECNICA</b>	<b>FIBRACOL PLUS</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede cortarse en las dimensiones de la herida.</li> <li>• Ideal combinarlo con apósitos secundarios.</li> <li>• Fácil de aplicar.</li> </ul>
Almacenamiento	Lugar fresco y seco
Presentaciones	• 5 cm x 5 cm – Caja x 12 Unidades
	• 10.2 cm x 11.25 cm – Caja x 12 Unidades
	• 10.2 cm x 22.25 cm – Caja x 6 Unidades
	• 1 cm x 1cm x 40 cm – Caja x 6 Unidades