



**FICHA TÉCNICA  
FLEXI-DRESS® VENDA ELASTICA**

**PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.**

**DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR**

PRODUCTO	
Nombre Genérico	<b>Venda Elástica</b>
Nombre Comercial	<b>Venda Elástica Flexi-Dress®</b>
Descripción	Venda extensible de gasa blanca impregnada con una pasta blanda de oxido de zinc no solidificable
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Limited - Reino Unido
Composición del Producto	Cada 100g contiene: oxido de zinc 26.69 g, glicerina 26.69 g, Aceite de castor 4.94 g Otros componentes: Acacia 6.32g, Petrolato blanco (vaselina) 18.82g, Agua Potable 16.54g. Gasa elástica hecha de poliéster y fibras de algodón
Características y Acciones del Producto	<b>No solidificable:</b> Por su contenido de emolientes: glicerina, aceite de castor, vaselina; esta venda no se solidifica, por el contrario permite que la piel periucleral permanezca humectada. <b>Proporciona Elastocompresión:</b> La venda proporciona una presión que favorece el retorno venoso <b>Medio Ambiente Húmedo:</b> Por sus componentes emolientes no se adhiere al lecho de la herida favoreciendo la promoción y formación del tejido de granulación y epitelización.
Usos	Tratamiento de úlceras vasculares venosas y edemas linfáticos
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante</li> <li>• Limpiar el lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas</li> <li>• Colocar el paciente con la pierna elevada y el pie en ángulo recto e inicie la aplicación de la venda desde la base de los dedos manteniendo una tensión uniforme</li> <li>• A partir del tobillo y hasta la rodilla, sobreponer en cada vuelta un 50% de la venda alrededor de la pierna. Verificar que no queden arrugas.</li> <li>• Colocar una venda elástica cubriendo el Flexi-Dress® para proporcionar la compresión sostenida necesaria.</li> <li>• NO colocar FLEXI-DRESS® a pacientes con úlceras arteriales o mixtas.</li> </ul>
Soporte Científico	1. Rev Mex Angiol 2007;35(1):21-26 2. Cordts,P.R., Narran, L.M., Rodrigues. A.A. Woodson, J. A Prospective, Randomized Trial of Unna's Boot Versus DuoDERM CGF Hidroactive Dressing Plus Compression in The management of Venous Leg Ulcers. Journal of Vascular Surgery 1992; 15 (3): 480-486.
Registro Sanitario:	INVIMA 2008DM-0002824R1 VIGENCIA: Septiembre 4 de 2019
Presentaciones:	Medidas: - 3 pulgadas x 10 yardas (7.6cm x 914.4cm) Cj x 1 - 4 pulgadas x 10 yardas (10.2cm x 914.4cm) Cj x 1



**FORMATO DE CALIFICACION  
FLEXI-DRESS®**

Calificación de 1 a 5

5= Excelente

1= Malo

**PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LA INSTITUCION**

CONCEPTO TÉCNICO					
Facilidad de Aplicación y Remoción:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Grado de compresión	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Reducción de la Frecuencia de Cambios	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de Formación de Tejido de granulación y epitelización:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Adaptabilidad a la extremidad	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Comodidad para el Paciente:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Presentación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calidad:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Empaque:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Servicio de Asesoría Profesional:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					