


Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Descripción:	
T004	R9	15-may-2019	CureBand Esparadrapo	
PARÁMETROS	ESPECIFICACIONES			
1. Producto	Esparadrapo Tela			
2. Nombre Comercial	Cureband Esparadrapo Tela			
3. Descripción	Dispositivo médico compuesto por un soporte de tela blanca y un adhesivo tipo caucho. El soporte de tela es de fácil rasgado y esta recubierto en una de sus caras con un adhesivo tipo caucho.			
4. Composición	Soporte de tela Adhesivo tipo caucho Antioxidantes Emolientes			
5. Características del Producto	Atributo	Método	Tolerancia	
	Fuerza Adhesiva (Kgf/25 mm)	Método Análítico Interno L040 (Versión Vigente)	≥ 0,50	
6. Aplicación	Protección de heridas, Fijación de Apósitos y de dispositivos médicos			
7. Almacenamiento	Almacenar en los empaques originales y en un lugar fresco, seco, ventilado y protegido de la luz directa del sol, del polvo, el calor y la humedad (T:25±5°C - HR:70±5%).			
8. Esterilidad	Se recomienda utilizar el método de esterilización con óxido de etileno (ETO) o por radiación. Los métodos de esterilización al vapor o calor seco, no son recomendables para este tipo de productos, porque las altas temperaturas pueden afectar las propiedades adhesivas del producto.			
9. Vida útil	24 meses a partir de la fecha de fabricación del producto.			
10. Registro Sanitario o Notificación Sanitaria	Número Registro Sanitario		Fecha de vigencia del Registro	
	2017DM-0000931 R3		junio-2027	
	Modalidad de Registro Sanitario			
	Fabricar y Vender		X	Titular del Registro Sanitario/
	Importar y Vender		N/A	
	Importar Semi-Elaborar y Vender		N/A	ADHINTER S.A.S.
	Clasificación del Riesgo		I	
	¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?		No	
	Productor		ADHINTER S.A.S.	
Distribuidor		TECNOQUIMICAS. S.A.		
Se cuenta con controles y generación de reportes de Tecnovigilancia			SI <u>X</u> NO ___	

Código:	Revisión:	Fecha Revisión:	Descripción:
T004	R9	15-may-2019	CureBand Esparadrapo

11. Instrucciones de Uso	<ul style="list-style-type: none"> - Facil Rasgado - Úselo sobre la piel limpia y seca. - Recomendado para vendajes extrafuertes. Inmovilización de articulaciones; ideal para deportistas. - Coloque Cureband. Esparadrapo sobre el apósito o dispositivo médico. - Presione ligeramente con los dedos para adherir sobre la piel. - Para evitar molestias al remover el esparadrapo levántelo en sentido del crecimiento del vello.
12. Recomendaciones de Uso	Usar solo una vez.

ADHINTER., garantiza el cumplimiento de las especificaciones dadas. Sin embargo, esto no exonera al cliente de realizar sus propias pruebas y comprobar si el producto se adapta a sus necesidades específicas.

13.	DESCRIPCIÓN DEL EMPAQUE			
Referencia	Presentación Comercial	CÓDIGO DEL PRODUCTO	Contenido	
			pulgadas x yardas	Centímetros x metro
CureBand® Esparadrapo	Blister	0642842	1/2 in x 5 yd	1.25 cm x 4.5 m
		0642903	1 in x 5 yd	2.5 cm x 4.5 m
		0642699	1/2 in x 5 yd	1.25 cm x 4.5 m
		0642712	1 in x 5 yd	2.5 cm x 4.5 m
		0642750	2 in x 5 yd	5 cm x 4.5 m
		0642804	3 in x 5 yd	7.5 cm x 4.5 m
		0642828	4 in x 5 yd	10 cm x 4.5m
	Caja Plegadiza	0642651	1/2 in x 1 yd (18 unidades)	1.25 cm x 0.9 m (18 unidades)
		0642675	1 in x 1 yd (12 unidades)	2.5 cm x 0.9 m (12 unidades)
CureBand® Medical	Tubo Hospitalario	0643050	Surtido 1: (1 rollo de 1 in x 10 yd, 2 rollos de 2 in x 10 yd, 1 rollo de 3 in x 10 yd, 1 rollo de 4 in x 10 yd)	
		0382258	Surtido 2: 12 rollos de 1 in x 10 yd	
		0381217	Surtido 3: 6 rollos de 2 in x 10 yd	
		0380542	Surtido 4: 4 rollos de 3 in x 10 yd	
		0383190	Surtido 5: 3 rollos de 4 in x 10 yd	

Revisado por:	Aprobado por :
_____	_____
Coordinador Técnico	Director Técnico