



**FICHA TÉCNICA
BOLSAS DRENABLES SUR-FIT PLUS®**

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Bolsa Drenable
Nombre Comercial	Bolsa Drenable Sur-Fit Plus®
Descripción	Bolsa recolectora de fluidos abierta en su parte distal, protegida en su cara posterior por un panel de plástico protector. La bolsa está provista de un aro Sur-Fit Plus®.
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec Dominican Republic Inc. - República Dominicana
Composición del Producto	Bolsa Drenable: elaborada en un plástico suave (Five Ply Film), cubierta en su parte frontal y posterior con un refuerzo en EMA para las medidas de 38 a 70mm y solo en la parte posterior para la medida de 100mm. Está provista de un aro Sur-Fit Plus® Flexible con ocho broches de contención.
Características y Acciones del Producto	<p>Protección de la piel: La bolsa esta cubierta en su parte posterior por un panel poroso plástico que absorbe la humedad e impide el contacto del plástico con la piel del paciente evitando así irritaciones de la piel. Mantiene la piel seca y protegida.</p> <p>Bolsas en color piel: Hace que la bolsa sea más discreta y no permite la visualización de su contenido. Se encuentra en los diámetros de 38 a 70mm.</p> <p>Bolsa transparente: Lo cual facilita el manejo de estomas difíciles, edematizados y de gran tamaño que requieren monitoreo visual permanente. Se encuentra solo en el diámetro de 100mm.</p> <p>Bolsa elaborada en plástico resistente a fugas: Evita que los gases salgan al exterior proporcionando así mayor Seguridad y comodidad al paciente.</p> <p>Ajuste perfecto: El aro Sur-Fit Plus® provisto de ocho broches de contención permite que se ajuste perfectamente al aro del mismo diámetro de las barreras Sur-Fit Plus® minimizando los riesgos de desacoples accidentales.</p> <p>Comodidad: Por ser una bolsa drenable le ofrece comodidad e higiene al paciente.</p>
Usos	Ostomías Digestivas: Ileostomías y Colostomías
Recomendaciones de Uso	<p>Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elegir la bolsa del mismo diámetro de la barrera protectora de piel Sur-Fit Plus® • Para acoplar la bolsa a la barrera, comenzar embonando los aros por los bordes inferiores. Asegúrese que queden bien embonados • Deje la bolsa con una pequeña cantidad de aire antes de acoplarla a la barrera para que pueda bajar libremente el efluente. • Si la bolsa se perfora por alguna razón desecharla y usar una nueva. • Colocar la pinza de cierre en la parte distal de la bolsa • Si se perfora por alguna razón la bolsa hay que desecharla
Registro Sanitario	INVIMA 2011DM-000028-R1 VIGENCIA: MARZO 10 DE 2021
Presentaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsas drenables opacas: Medidas: Diámetros de 38mm - 45mm - 57mm - 70mm Cj x 10 unidades c/u • Bolsa drenable transparente: Medida: Diámetro de 100mm Cj x 10 unidades



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
BOLSAS DRENABLES SUR-FIT PLUS®**

Calificación de 1 a 5

5= Excelente

1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Sistema de acople a la barrera de piel (broches de contención)	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de Protección de la Piel	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Resistencia a los Drenajes	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de la bolsa	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Remoción:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Reducción de la Frecuencia de Cambios de Dispositivo	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Control del olor	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Drenaje de la Bolsa	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Seguridad del Sistema de Cierre	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Resistencia de la Pinza de Cierre	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Comodidad para el Paciente:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Empaque:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Presentación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calidad:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Servicio Post-Venta: Asesoría educativa y Servicio al Cliente	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					