

Familia de Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™
Cuidado del Sitio Intravenoso (IV): Técnicas de Aplicación y Remoción

Apósitos Transparentes Tegaderm™

Familia de Apósitos



Útil.

Eficiente.

Confiable.



Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™

Los Apósitos Transparentes Tegaderm™ son los preferidos por los profesionales de la salud para la protección y estabilización de los catéteres IV. La seguridad y desempeño del producto están respaldados por estudios clínicos realizados en una amplia variedad de escenarios para el cuidado de la salud. 3M ofrece una extensa línea de tamaños, formas y sistemas de aplicación, brindándoles así, al profesional y al paciente, una solución para cada una de las necesidades clínicas relacionadas con apósitos transparentes.

Facilidad de aplicación incomparable

- Ingenioso sistema de aplicación tipo “marco”, que hace más rápida y fácil la colocación del apósito en forma precisa y segura en cada ocasión.
- Incluso, puede ser aplicado con una sola mano en la mayoría de las situaciones clínicas.

Protección mejorada del sitio

- Los apósitos Tegaderm™ son permeables al intercambio de gases de la piel con el exterior, permitiendo la entrada de oxígeno y la salida del vapor húmedo, sin comprometer el normal funcionamiento de la piel.
- La película transparente estéril es una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus*, previniendo la contaminación externa del sitio.

Cómodo para los pacientes

- La película es flexible y se adapta a los movimientos del paciente.
- La menor frecuencia de cambios de apósitos disminuye el riesgo de daño de la piel.
- El adhesivo es suave con la piel y, sin embargo, posee una buena adherencia para un uso prolongado.
- Los diseños especiales, para catéteres voluminosos y múltiples lúmenes, reducen la tensión en el apósito y en las suturas.
- Los apósitos con corte superior y material de tela suave distensible, para catéteres centrales voluminosos y con múltiples lúmenes, brindan amortiguación debajo del conector del catéter.

Costo efectivo

- El sitio IV puede ser fácilmente observado en todo momento para detectar signos tempranos de complicaciones sin necesidad de perturbar o de cambiar el apósito.
- Los apósitos transparentes pueden permanecer en su lugar hasta 7 días**, en comparación con los apósitos de gasa y cinta que duran de 24 a 48 horas.
- Los cambios menos frecuentes ahorran tiempo y costos en los suministros, y reducen el potencial de contaminación del sitio.



- El adhesivo especial del Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ HP (Poder de Fijación) brinda mayor capacidad de adherencia en condiciones diaforéticas o de humedad ambiental.

Clínicamente comprobado

- Los apósitos Tegaderm™ están avalados por más estudios clínicos que cualquier otra marca de apósitos transparentes.
- Reconocidas recomendaciones y guías internacionales están respaldadas por estudios clínicos que utilizan apósitos transparentes Tegaderm™.**

Siga las mejores prácticas y estándares clínicos


- Las Recomendaciones de la HICPAC/CDC 2002 para la Prevención de las Infecciones Relacionadas con Catéteres Intravasculares basan sus lineamientos para el cambio de apósito de catéteres venosos periféricos y catéteres venosos centrales (incluso los de hemodiálisis) en estudios donde se usaron Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™.
- Los Estándares de Práctica de la Sociedad de Enfermeras de Infusión de los EE.UU. (INS) recomiendan que un apósito estéril debe ser aplicado y mantenido para proteger el sitio de punción intravenosa

* Pruebas de laboratorio *in vitro* han demostrado que los apósitos transparentes Tegaderm™ y Tegaderm™ HP brindan una barrera efectiva contra virus de 27 nm de diámetro (Ej. VHC) o más grandes (Ej. VHB y VIH) mientras los apósitos permanezcan intactos, sin infiltraciones o fugas.


** Recomendaciones de la HICPAC/CDC 2002 para la Prevención de las Infecciones Relacionadas con Catéteres Intravasculares.

Aplicación de los Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™


Lea íntegramente todas las contraindicaciones, advertencias y precauciones antes del uso.

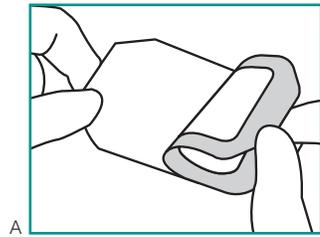


1. Prepare la piel de acuerdo con el protocolo institucional. Deje que todos los preparados líquidos se sequen completamente. Retire el recubrimiento impreso del apósito y observe el sitio IV a través de la película.

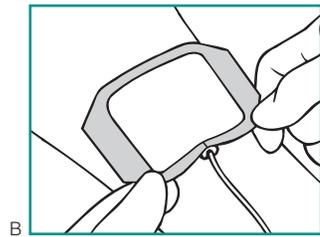


2. Alinee la hendidura del marco del apósito con el conector del catéter. Aplique el apósito justo hasta el borde superior del conector. No estire el apósito durante la aplicación.

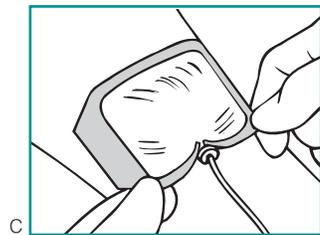


3. Adhiera el apósito alrededor del conector y presiónelo en su lugar.

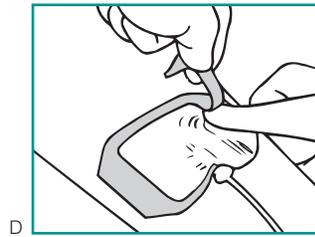

4. De manera firme, alise los bordes del apósito a medida que remueve lentamente el marco de aplicación.

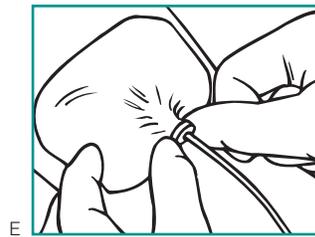


5. Ajuste y selle suavemente el apósito para que quede ceñido alrededor del catéter. Alise todo el apósito desde el centro hacia los bordes, aplicando una presión firme para mejorar la adhesión.

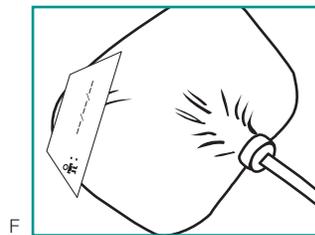

6. Documente la inserción del catéter o la información del cambio de apósito antes de retirar la etiqueta de documentación del marco. Coloque la etiqueta en el borde del apósito o directamente sobre la piel.

Remoción de los Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™

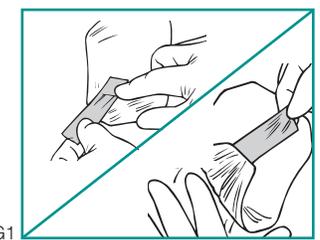

Para ayudar a levantar el borde del apósito, use la etiqueta de la documentación o fije un trozo de cinta quirúrgica a una de las esquinas y frote firmemente (Figura G1). Sostenga la piel y el catéter con sus dedos, mientras remueve el apósito. Emplee una de las siguientes técnicas de remoción:

1. Remueva lentamente el apósito de la piel, ayudándose con la etiqueta de documentación o con un trozo de cinta. Pliegue el apósito hacia atrás, sobre sí mismo, a medida que lo remueve (Figura G1), en lugar de tirarlo hacia arriba (Figura G2). Remueva el apósito desde el conector hacia el sitio de inserción.



O BIEN,

2. Tome uno de los bordes del apósito y estire suavemente, de forma paralela a la piel, para liberar el adhesivo (Figura H).

O BIEN,

3. Aplique en el borde del apósito, y en contacto con el adhesivo, un removeedor de adhesivo adecuado para usar sobre la piel mientras va retirando lentamente el apósito.



G2

Aplicación de los Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™ IV con Borde superior


(Códigos 1633 y 1635)

Aplicación:

1. Abra el empaque y retire el apósito estéril.
2. Desprenda la ventana central y colóquela en un campo estéril. Las tiras de cinta adhesiva estéril permanecerán anexadas a esta pieza (Figura A).
3. Desprenda el recubrimiento del apósito, que expone la superficie adhesiva (Figura B).
- 4a. Cuando use el apósito transparente Tegaderm™ IV código 1633:
Coloque el apósito de manera que el corte superior encaje cómodamente alrededor del puerto de acceso y por debajo del conector del catéter (Figura C). Las lengüetas reforzadas del apósito ayudarán a asegurar el catéter. Las lengüetas se pueden traslapar ligeramente para proporcionar más estabilidad y amortiguación bajo el conector del catéter.
- 4b. Cuando use el apósito transparente Tegaderm™ IV código 1635:
Coloque la porción transparente del apósito de forma que quede centrada sobre el sitio de inserción, mientras sostiene la porción con el corte superior sin entrar en contacto con la piel (Figura C).
5. Superponga las lengüetas reforzadas por debajo del catéter para formar un sello hermético alrededor del catéter o los lúmenes (Figura D).
6. Retire lentamente el marco de aplicación mientras que alisa los bordes del apósito (Figura E). Selle los bordes del corte superior y alise el apósito desde el centro hacia los bordes utilizando una presión firme para favorecer la adherencia.
7. Registre la información en la etiqueta de documentación, luego aplíquela sobre o cerca del apósito (Figura F); evite ponerla sobre el sitio de inserción.

Las tiras de cinta adhesiva estéril se pueden usar:

- Debajo de las alas del catéter o conector — para proteger la piel.
- Por encima de las alas del catéter o conector — para mejorar la estabilidad del catéter.
- Para asegurar el tubo intravenoso o para estabilizar los lúmenes del catéter.

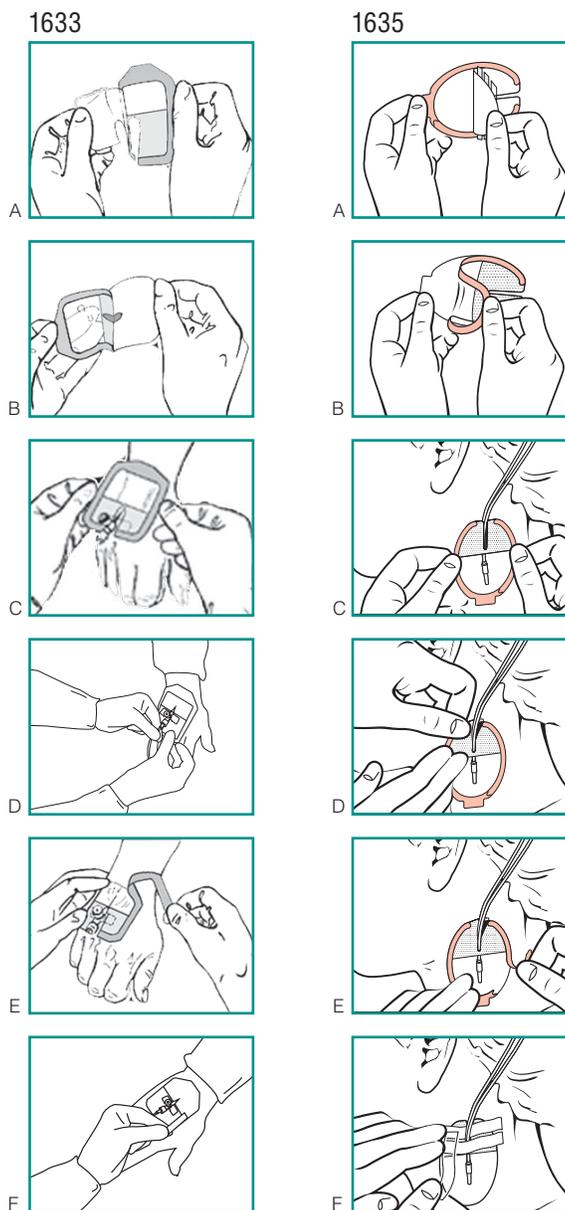

Remoción de los Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™ IV con Borde superior

(Códigos 1633 y 1635)

Remoción del apósito:

Sostenga la piel y el catéter al remover el apósito, para prevenir el daño en la piel o el desplazamiento del catéter.

1. Remueva toda cinta adhesiva aplicada en la parte superior del apósito. Si fuese necesario, ayude a aflojar las cintas adhesivas con alcohol.
2. Separe las lengüetas del apósito y despréndalas suavemente hacia atrás, hasta la porción transparente.

3. Tome uno de los bordes del apósito transparente y despréndalo lentamente hacia el catéter, en dirección del crecimiento del pelo. Evite causar traumatismo a la piel removiendo el apósito hacia atrás, plegado sobre sí mismo, en vez remo-

verlo tirándolo hacia arriba. O bien, estire suavemente la porción transparente, en forma paralela a la piel, para liberar el adhesivo. También puede hacer uso de un removedor de adhesivo de uso médico para facilitar la remoción.

CONSEJOS ÚTILES PARA LAS APLICACIONES

Para mejorar el uso prolongado del apósito

- Escoja un apósito lo suficientemente grande para proveer al menos 2 a 3 cm de margen para la adhesión sobre piel seca y sana alrededor del sitio del catéter.
- Recorte el exceso de pelo del sitio donde se aplicará el apósito. No se recomienda afeitar el pelo.
- Asegúrese de que la piel esté libre de jabones, detergentes y lociones.
- Deje que todas las soluciones antisépticas y protectoras de la piel se sequen completamente antes de aplicar el apósito. Los productos adhesivos no se adhieren bien a superficies húmedas o aceitosas.
- Si se estira el apósito durante la aplicación, puede afectarse su adherencia y dañar la piel.
- Ajuste y selle el apósito para que quede ceñido alrededor del catéter.
- Para obtener los mejores resultados, siempre aplique una presión firme sobre el apósito desde el centro y hacia los bordes. El adhesivo utilizado en los apósitos Tegaderm™ es sensible a la presión.
- Utilice apósitos de diseño especial como el Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ IV con Borde superior, códigos 1635 ó 1633, para prevenir que se levanten los bordes del apósito como consecuencia de la masa del catéter o debido a la manipulación de los lúmenes del catéter.
- Seleccione un apósito absorbente como el Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ + Pad con almohadilla no adherente como apósito inicial en sitios de inserción que presentan secreciones o sangrado.

Cuidado del sitio

- Siga las precauciones estándares mediante un protocolo establecido para prevenir infecciones.
- Inspeccione diariamente el sitio por signos de infección u otras complicaciones
- Si se sospecha de infección, remueva el apósito Tegaderm™, inspeccione el sitio del catéter directamente, y determine la intervención médica más apropiada.

Para prevenir el daño de la piel

	<p>Flictenas en los bordes (piel con eritema, pequeñas ampollas alrededor del borde del apósito)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No estire el apósito durante la aplicación. Aplicar un producto adhesivo con tensión puede provocar daño mecánico a la piel.
	<p>Irritación de la piel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la piel esté libre de jabones, detergentes y lociones antes de aplicar el apósito. Las preparaciones líquidas que se aplican en la piel y los residuos de jabón, lociones o detergentes pueden causar irritación si quedan atrapados debajo del apósito. • Antes de la aplicación del apósito, asegúrese de que el paciente no sea sensible o alérgico a los productos adhesivos.
	<p>Desprendimiento de la epidermis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice técnicas adecuadas para la remoción del apósito o cinta quirúrgica adhesiva. • Para las pieles ya lesionadas, utilice un producto sin alcohol que forme una película de barrera como la Película Protectora sin Ardor 3M™ Cavilon™ (aplicador en hisopo de 1 mL – código 3343/3343E). Aplique el producto sobre la zona de piel donde será aplicado el apósito.
	<p>Piel delicada o cambios frecuentes de apósitos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice un producto sin alcohol que forme una película barrera, como la Película Protectora sin Ardor 3M™ Cavilon™ (aplicador en hisopo de 1 mL – código 3343/3343E) para proteger la piel delicada o la piel que está expuesta a remociones frecuentes de productos adhesivos. Aplique el producto sobre la zona de piel donde será aplicado el apósito.

Apósitos para catéteres IV específicos

1. Catéteres de hemodiálisis, arteria pulmonar, multilumen

- No dependa de un apósito transparente estándar para poder sostener la masa y controlar el movimiento de los lúmenes externos y de los puertos de acceso.
- Seleccione un apósito de diseño especial como el Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ IV con Borde superior código 1635 para prevenir el levantamiento de los bordes del apósito como consecuencia de la masa del catéter o de la manipulación de los lúmenes del catéter.
- Al preparar el sitio, siempre recorte el exceso de pelo para asegurar la buena adherencia del apósito.
Ponga atención en caso de que vuelva a crecer el pelo, ya que podría levantar y desprender el apósito y la cinta de la piel.
- Para los catéteres yugulares, aplique el apósito y la cinta con la cabeza del paciente alejada y el cuello extendido, como es de esperar en un movimiento normal. Esto ayuda a prevenir la tensión en el apósito cuando el paciente se mueve.



Apósito Tegaderm 1626W en PICC




Apósito Tegaderm IV 1635 en subclavia

- Aplique la cinta adhesiva a cada lumen por separado, justo por debajo de los puertos de acceso. Coloque la cinta de forma tal que se pueda acceder a los puertos de acceso sin perturbar el apósito.

2. Catéteres PICC:

Los PICC (Catéteres Centrales de Inserción Periférica, por sus siglas en inglés) generalmente no están suturados y salen de la piel cerca del codo, donde el movimiento articular incrementa el potencial de desplazamiento del catéter. Además, la mayoría de los PICC están fabricados de silicona, la cual no se adhiere bien a los adhesivos de uso médico. Un apósito transparente, que incorpora cintas adhesivas estériles, brinda una óptima fijación de las vías PICC.

1. El conector del catéter debe asegurarse a la piel, antes de aplicar el apósito, con las Suturas Cutáneas Adhesivas 3M™ Steri-Strip™ o con cinta estéril (ahora suministrada con el apósito). A menos que el catéter se inserte completamente hasta el conector, deje cierta holgura en la línea a la altura del sitio de salida antes de estabilizar el catéter, para que éste no se desplace en caso de que ocurra un movimiento repentino (Figuras A y B).
Para PICC con alas de mariposa: cruce con cinta las alas (Figura C) o use la técnica en "U" para asegurar las alas (Figura D).
Para PICC sin alas de mariposa: cruce con cinta el conector (Figura E) o use la técnica de "corbata" (Figura F).
2. Coloque el apósito transparente de forma tal que cubra el sitio de inserción y se extienda hasta el borde del conector (Figuras G y H). De manera firme, alise los bordes del apósito a medida que remueve lentamente el marco de aplicación. Ajuste y presione suavemente el apósito para que quede ceñido y hermético alrededor del conector.
3. Alise el apósito por completo a partir del centro y hacia los bordes, utilizando una presión firme para mejorar la adherencia.
4. Deslice una tira adhesiva estéril de 7 a 10 cm por debajo del conector, con el lado adhesivo hacia arriba. Lleve los extremos de la cinta sobre el conector, hacia la parte SUPERIOR del apósito transparente en forma de "corbata" o de "U". Esto hace que el conector quede en el medio, entre las cintas y el apósito transparente, para lograr un mejor aseguramiento del dispositivo (Figuras I y J).

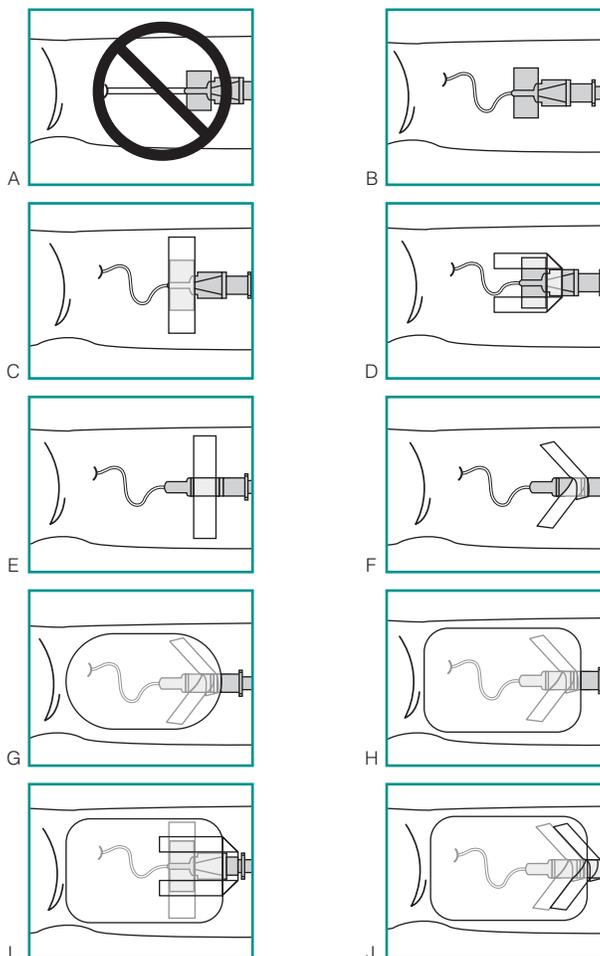

Apósitos para catéteres IV específicos - continuación

3. Puertos implantados o catéteres con reservorio:

- Seleccione un apósito lo suficientemente grande como para contener la altura de la aguja de acceso y un buen margen alrededor del sitio de inserción.
- No inserte la aguja a través del apósito transparente.



Tegaderm™ 1626W sobre un puerto implantado.

Para mejorar la estabilización de los catéteres IV periféricos:

- Para lograr una estabilización adicional, seleccione un apósito de diseño especial como el Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ IV código 1633 con Borde superior, o el Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ HP (Poder de Fijación), código 9519HP.
- Si aplica cinta adhesiva por debajo del apósito, ésta debe ser cinta estéril.



Tegaderm™ IV 1633 en catéter periférico.



Tegaderm™ HP 9519HP en catéter periférico.

Para reducir los riesgos de infección

- Seleccione el tamaño de apósito que cubra adecuadamente el catéter y el sitio de inserción.
- Recorte el exceso de pelo según sea necesario. No rase el pelo, debido al potencial de producir microabrasiones en la piel.
- Antes de la inserción del catéter, prepare la piel con una solución antiséptica de acuerdo con el protocolo de su institución.
- Durante cada cambio de apósito, preste cuidadosa atención a la antisepsia de la piel alrededor y por debajo del catéter.
- Desinfecte cuidadosamente los puertos de inyección antes del acceso.
- Inspeccione el sitio frecuentemente para detectar signos tempranos de complicaciones. Los apósitos transparentes permiten la fácil valoración del sitio sin necesidad de remover el apósito.
- Cambie el apósito de acuerdo con el protocolo de su institución, o cuando se humedezca, afloje o ensucie. El levantamiento de los bordes de un apósito transparente no significa necesariamente un problema, a menos que hubiera un canal desde el borde del apósito hacia el sitio inserción IV del catéter.
- Utilice barreras de precaución máxima para la inserción de un catéter central y una técnica estéril para el cuidado del sitio.
- Utilice una técnica aséptica para la inserción de un catéter periférico y el cuidado del sitio.
- Proteja la piel de posibles irritaciones. La piel comprometida cerca del sitio de inserción del catéter incrementa el riesgo de complicaciones.
- Ningún apósito puede sustituir el cuidado profesional del sitio IV.

Precauciones:

1. Detenga cualquier sangrado presente en el sitio de inserción intravenoso antes de aplicar el apósito.
2. No estire o tensione el apósito durante la aplicación, porque podría causar traumatismo a la piel.
3. Asegúrese de que la piel esté limpia, libre de residuos de jabón y lociones, y permita que seque completamente antes de aplicar el apósito, para prevenir la irritación de la piel y garantizar una buena adherencia.
4. El apósito puede ser utilizado en un sitio infectado sólo cuando esté bajo la vigilancia y cuidado de un profesional de la salud.
5. Los ungüentos antimicrobianos que contienen polietilenglicoles pueden comprometer la resistencia de la película de los Apósitos Transparentes Tegaderm™ HP.
6. Los Apósitos Transparentes Tegaderm™ no deben volver a esterilizarse por métodos de radiación gamma, haz de electrones o vapor húmedo.

Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™

Familia de Apósitos



Información para pedidos:

	Código N° NDC	Tamaño	Apósitos/Caja	Cajas/Estuche	Código HCPCS*
Antimicrobiano CHG	Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ CHG para el aseguramiento IV con gluconato de clorhexidina				
	1657 NDC 8333-1657-01	8.5 cm x 11.5 cm 3 1/2 in x 4 1/2 in	25	4	A6257
	1658 NDC 8333-1658-01	10 cm x 12 cm 4 in x 4 3/4 in	25	4	A6257
	1659 NDC 8333-1659-01	10 cm x 15.5 cm 4 in x 6 1/8 in	25	4	A6258
IV Avanzado	Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ IV con Borde				
	1610 NDC 8333-1610-01	5 cm x 5.7 cm 2 in x 2 1/4 in	100	4	A6257
	1650 NDC 8333-1650-01	10 cm x 15.5 cm 4 in x 6 1/8 in	25	4	A6258
	1655 NDC 8333-1655-01	8.5 cm x 11.5 cm 3 1/2 in x 4 1/2 in	50	4	A6257
	1633 NDC 8333-1633-01	7 cm x 8.5 cm 2 3/4 in x 3 3/4 in	100	4	A6257
	1635 NDC 8333-1635-01	8.5 cm x 10.8 cm 3 1/2 in x 4 1/4 in	50	4	A6257
	Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ con Borde				
	1614 NDC 8333-1614-05	6 cm x 7 cm 2 3/8 in x 2 3/4 in	100	4	A6257
	1616 NDC 8333-1616-05	10 cm x 12 cm 4 in x 4 3/4 in	50	4	A6258
	Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ HP (Poder de Fijación)				
9519HP NDC 8333-9519-01	6 cm x 6 cm 2 3/8 in x 2 3/8 in	100	4	A6257	

	Código N° NDC	Tamaño	Rollos/Caja	Cajas/Estuche	Código HCPCS*	
Rollo	Película Transparente 3M™ Tegaderm™ Rollo (No estéril)					
	16002 NDC 8333-1600-20	5 cm x 10 m 2 in x 11 yd	1	4	A6257- A6259	
	16004 NDC 8333-1600-40	10 cm x 10 m 4 in x 11 yd	1	4	A6257- A6259	
	16006 NDC 8333-1600-60	15 cm x 10 m 6 in x 11 yd	1	4	A6257- A6259	
Estándar	Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ (Borde de aplicación)					
	1622W NDC 8333-1622-05	4.4 cm x 4.4 cm 1 3/4 in x 1 3/4 in	100	4	A6257	
	1623W NDC 8333-1623-05	6 cm x 7 cm 2 3/8 in x 2 3/4 in	100	4	A6257	
	1624W NDC 8333-1624-05	6 cm x 7 cm 2 3/8 in x 2 3/4 in	100	4	A6257	
	1626W NDC 8333-1626-05	10 cm x 12 cm 4 in x 4 3/4 in	50	4	A6258	
	1630 NDC 8333-1630-05	10 cm x 11.5 cm 4 in x 4 1/2 in	50	4	A6258	
	Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ (Borde de aplicación - empaques con pocas cantidades)					
	9505W NDC 8333-9505-05	6 cm x 7 cm 2 3/8 in x 2 3/4 in	20	10	A6257	
	9506W NDC 8333-9506-05	10 cm x 12 cm 4 in x 4 3/4 in	10	10	A6258	
	Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ HP (Poder de Fijación)					
	9534HP NDC 8333-9534-01	6 cm x 7 cm 2 3/8 in x 2 3/4 in	100	4	A6257	
	9536HP NDC 8333-9536-01	10 cm x 12 cm 4 in x 4 3/4 in	50	4	A6258	
	9543HP NDC 8333-9543-01	11.5 cm x 12 cm 4 1/2 in x 4 3/4 in	12	4	A6258	
	9545HP NDC 8333-9545-01	5.4 cm x 6.4 cm 2 1/8 in x 2 1/2 in	50	6	A6257	
	9546HP NDC 8333-9546-01	10 cm x 11.5 cm 4 in x 4 1/2 in	50	4	A6258	
	9548HP NDC 8333-9548-01	14 cm x 16.5 cm 5 1/2 in x 6 1/2 in	10	8	A6258	
	Básico	Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ (marco de aplicación)				
		1634 NDC 8333-1634-01	6 cm x 7 cm 2 3/8 in x 2 3/4 in	100	4	A6257
		1626 NDC 8333-1626-01	10 cm x 12 cm 4 in x 4 3/4 in	50	4	A6258
		1627 NDC 8333-1627-01	10 cm x 25 cm 4 in x 10 in	20	4	A6258
1628 NDC 8333-1628-01		15 cm x 20 cm 6 in x 8 in	10	8	A6258	
1629 NDC 8333-1629-01		20 cm x 30 cm 8 in x 12 in	10	8	A6259	
Apósito Transparente 3M™ Tegaderm™ (primeros auxilios)						
1620 NDC 8333-1620-01		6 cm x 7 cm 2 3/8 in x 2 3/4 in	100	6	A6257	
1621 NDC 8333-1621-01	10 cm x 12 cm 4 in x 4 3/4 in	50	4	A6258		

Apósito Tegaderm™

ÚTIL, EFICIENTE Y CONFIABLE.

Para conocer más sobre los productos Tegaderm™, visítenos en www.3M.com/tegaderm. Para obtener mayor información sobre la familia de productos para la Salud de la Piel, visítenos en www.3M.com/skinhealth, comuníquese con su representante de Salud de la Piel 3M o llame a la Línea de Ayuda y Atención al Cliente para el Cuidado de la Salud de 3M al 1-800-228-3957. Fuera de los Estados Unidos, comuníquese con la subsidiaria local de 3M.

* Códigos HCPCS que figuran en las Políticas Médicas para Apósitos Quirúrgicos en la Determinación de la Cobertura Local. Descargo de Responsabilidades: Se han facilitado los códigos HCPCS para ayudarlo en la preparación de los reclamos de la Parte B de Medicare. Sin embargo, tenga en cuenta por favor que la información de reembolso suministrada por la División 3M Cuidado de la Salud y sus representantes está diseñada para brindar información general relevante a la cobertura y codificación para los productos de 3M. Las políticas de reembolso de las aseguradoras pueden variar y el uso de los códigos aquí tratados no garantiza que la aseguradora cubra o pague a un nivel particular. Los proveedores de cuidado de la salud deben ejercer su juicio clínico independiente al elegir los códigos que describan con mayor precisión los productos suministrados.



División Médica
3M Cuidado de la Salud
 3M Center, Building 275-4W-02
 St. Paul, MN 55144-1000
 EUA
 1-800-228-3957
www.3M.com/healthcare

3M, Cavilon, Steri-Strip y Tegaderm son marcas registradas de 3M Company. Por favor recicle. Impreso en EUA. © 3M 2005, 2007, 2008, 2009. Todos los derechos reservados. 70-2000-0000-0