

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Fecha de actualización: 13/02/19
	<b>TRI-BALL EJERCITADOR FLUJOMÉTRICO</b>	<b>Technical Specifications Especificaciones Técnicas</b>

**MARCA:** Global Healthcare.

**DESCRIPCIÓN:** Incentivo Inspiratorio de tipo FLUJOMETRICO, que ayuda al paciente a mantener el máximo esfuerzo inspiratorio. El procedimiento utiliza un incentivo visual: 3 bolas que se elevan cuando el paciente inspira o espira y que condiciona el logro de un esfuerzo inspiratorio máximo.

**COMPOSICIÓN:** Boquilla, tubo de aspiración y una carcasa que contiene tres elementos móviles: tres bolas de diferentes colores, filtro de polvo y partículas.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Boquilla ejercitador respiratorio	PP - Polipropileno
Tubo corrugado	PE - Polietileno
Carcasas	PS - Poliestireno
Bola 1,2 y3	ABS – Acrilo Butadieno estireno

**PRESENTACIONES COMERCIALES:** Un unidad por bolsa transparente. 12 unidades/caja.

Ítem	Descripción	Empaque	Código de barras	N° Registro Invima
63-852	Tri-Ball Ejercitador Respiratorio	12unidades/caja	Unidad:872237008049 Corrugado: 40872237008047	2011DM-0006922 vigente hasta 08 Mar 2021. Riesgo: IIA

**TIPO DE CONSERVACIÓN:** Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

**TIPO DE TRATAMIENTO:** Los Incentivos Inspiratorios están diseñados para estimular al paciente por retroalimentación visual, a realizar inspiraciones sostenidas máximas. Se clasifican según el patrón de activación: dependientes de flujo o dependientes de volumen. El TRI-BALL Es un ejercitador dependiente de flujo. Posee unas esferas que provocan un efecto de retroalimentación visual al indicar las tasas de flujo obtenidas en escalas contenidas en los cilindros. Las tres cámaras contienen cada una esfera que se eleva de acuerdo con el flujo generado por el paciente durante la inspiración máxima. Los flujos alcanzados corresponden a 600, 900 y 1200 cc/segundo. Está indicado en pacientes a quienes se les realiza una cirugía torácica o abdominal o que tienen periodos de reposo prolongado con descondicionamiento funcional respiratorio que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones pulmonares como atelectasias, neumonía, etc., que alteran la capacidad funcional residual. Es un producto ligero, sencillo y fácil de usar y que anima al paciente a continuar su uso hasta alcanzar el objetivo marcado y prescrito previamente por el fisioterapeuta.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Este producto es libre de látex y debe usarse en un solo paciente.

**VIDA ÚTIL:** 5 años.

**OBSERVACIONES:** Antes y después de su utilización es conveniente lavar la boquilla y guardarla en su alojamiento para una mayor protección higiénica, así como volver a guardar el Tri-Ball en su reservorio de origen hasta su posterior utilización.



Tri-Ball – Ejercitador Flujométrico

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:  
 Colombia: [ghc-colombia@globalhealthcare.net](mailto:ghc-colombia@globalhealthcare.net)  
 Chile: [infochile@globalhealthcare.net](mailto:infochile@globalhealthcare.net)  
 Sitio web: [www.globalhealthcare.net](http://www.globalhealthcare.net)