



Apósito Transparente con Ranura en IV

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Transparente / Permite la monitorización continua del sitio de inserción del catéter, permitiendo la revisión sin remover el apósito.
- Marco de papel y tiras estériles / Permiten mejor aseguramiento del catéter, reduce la posibilidad de desprendimiento del dispositivo y de contaminación en el punto de inserción del catéter.
- Membrana semipermeable / Permite el intercambio gaseoso de la piel e impide la entrada de agua, bacterias, virus y fluidos corporales.
- Impermeable / Facilita la higiene y bienestar, ya que el paciente se puede bañar sin poner en riesgo la integridad del apósito.
- Hipoalergénico / Reduce el riesgo de una reacción alérgica.
- Suave con la piel / Posee una buena adherencia para un uso prolongado en el tiempo.
- Presentación estéril / Brinda seguridad y evita los riesgos de contaminación.
- Etiquetas / Para registrar cuando se realizó la punción.

APLICACIÓN:

Cuenta con una tira de esparadrapo de papel para anotar la fecha de colocación del apósito.

1. Primero, remueva el papel protector más grande.
2. Remueva el resto del papel protector. Alise la película con la yema de los dedos.
3. Retire el papel transparente comenzando por la banda roja de fácil aplicación en un solo movimiento.
4. Para retirar despegue suavemente el apósito, estirándolo en dirección de los vellos.

PRESENTACIÓN:



6.5 cm x 7 cm 50 apositos por Caja

8.5 cm x 10.5 cm 50 apositos por Caja

